




## Цервикальный катетер-колпачок для гистеросальпингографии ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Показания:** Для введения контрастного вещества на водной и масляной основе для диагностики непроходимости фаллопиевых труб, маточных аномалий и прочих патологических состояний, ассоциируемых с первичным и вторичным бесплодием. Это устройство предназначено для использования только соответствующим образом обученным персоналом, или под его наблюдением, и в соответствии с региональными и национальными методическими указаниями, такими как опубликованные Королевской коллегией акушеров и гинекологов и Королевской коллегией рентгенологов.

### Противопоказания:

1. Соблюдая правила асептики, откройте упаковку и извлеките катетер-колпачок.
2. Эту диагностическую процедуру можно обычно выполнять без введения лекарственных средств, хотя воздействие легких седативных средств класса IV и/или анальгетиков может быть необходимо для очень беспокойных пациенток.
3. Положите пациентку в литотомическое положение с поднятыми коленями, откройте доступ к шейке матки с помощью медицинского зеркала типа Cusco или Sims. Определите ориентирование шейки и установите положение наружного пришеечного зева. Удалите излишнюю слизь стерильным физиологическим раствором или водным антисептическим раствором.
4. Разместите дистальный кончик катетера-колпачка в наружном пришеечном зеве, так, чтобы колпачок накрыл шейку
5. Подсоедините шприц к линии для создания вакуума и забрав воздух шприцом создайте герметичность соединения с шейкой, закройте клемму на этой линии и отсоедините шприц (только для моделей R57493, R57494 и R57495).
6. Извлеките зеркало.
7. Присоедините шприц объемом 10 или 20 мл к линии для введения контраста.
8. Введите 10-20 мл контрастной среды, достаточной для адекватного контрастирования и полости матки и фаллопиевых труб.
9. Дополнительные объемы контрастного вещества можно добавить закрывая клемму и пополняя шприц (только для моделей R57493, R57494 и R57495).

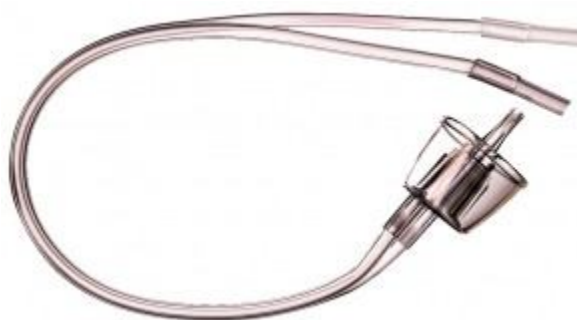

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не создавайте избыточный вакуум, т.к. это может привести к повреждению слизистой шейки матки, и к ощущению значительного дискомфорта.

**ВНИМАНИЕ:** НЕ для использования с напорными инжекторами.

**Чтобы извлечь устройство:** Отсоедините шприц (для моделей R57490, R57491) или откройте клемму на линии создания вакуума (для моделей R57493, R57494 и R57495). Осторожно извлеките колпачок из влагалища.

**Использование только для одной пациентки:** Не использовать повторно для другой пациентки, не проводить повторную обработку и повторную стерилизацию, поскольку такие действия могут ухудшить структурную целостность устройства, приводя к его выходу из строя; и потенциально – причинить вред пациенткам и пользователям. Повторное применение, повторная обработка или повторная стерилизация могут также привести к причинению серьезного вреда пациенткам и пользователям по причине перекрестного заражения и инфицирования передающимися заболеваниями.

**Утилизация:** С этим устройством следует обращаться и утилизировать его в соответствии с местной стратегией лечебного учреждения и с соблюдением всех действующих правил, включая, помимо прочего, правила, относящиеся к здоровью и безопасности человека и защите окружающей среды.

Федеральным законом (США) ограничена продажа, распространение и использование этого устройства врачом или по его распоряжению.

### УТИЛИЗОВАТЬ ПОСЛЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ – НЕ ПОДВЕРГАТЬ ПОВТОРНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Содержание упаковки является стерильным до вскрытия или при отсутствии ее повреждения. Стерилизовано EtO.

Хранить при комнатной температуре. Не допускать продолжительного воздействия повышенных температур.



При производстве этого устройства не использован природный резиновый латекс.

Произведено в Соединенном Королевстве компанией: **ROCKET MEDICAL PLC**, Седлинг Роуд, Вашингтон, Англия, NE38 9BZ

Rocket® является зарегистрированной торговой маркой компании **ROCKET MEDICAL PLC**.

Распространитель в США **ROCKET MEDICAL**

150 Рекриэйшн Парк Драйв Блок 3 Хингем шт. Массачусетс 02043 США Тел.: 1-800-707-7625



0120

ZDOCK 049

120813

Ред. 13

Авторское право 1998-2013

**ROCKET MEDICAL PLC**

Все права защищены (GB)